

# 3M

## Littmann

Electronic Stethoscope Model 3000 *with Ambient Noise Reduction*

リットマン エレクトロニック ステソスコープ モデル 3000



DON'T MISS THE SOUNDS YOU NEED TO HEAR.


もう、聴き逃しません。大切な音。

リットマン エレクトロニック ステソスコープ モデル 3000 なら、  
聴き逃しのリスクが1/5に減少します。

70-75dBの環境下での聴診器との比較テストで、大動脈弁閉鎖不全(Ⅱ度)の音を聞き逃す確率が23.4%からわずか4.8%に減少しました。(米国3M社実験データより)

リットマン エレクトロニック ステスコープ モデル 3000 は、これまで 3M が培ってきた音響特性に電氣的増幅技術を取り入れることにより、従来のリットマンステスコープの 18 倍の音響増幅を可能にしました。さらに、ANR (Ambient Noise Reduction) テクノロジーにより、周囲の騒音を平均 75% 低減し、騒がしい環境の中でも正確な生体音聴診を可能にします。

### ANR (Ambient Noise Reduction) テクノロジー

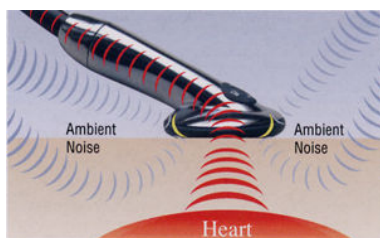

正確な聴診を妨げる話し声や周囲の騒音による雑音は、空気中を伝わってチェストピースの隙間から入ってくるものと、体内を經由して聴診器に入ってくるものがあります。

「それら2つの音を相殺し、雑音を低減させる技術」が ANR (Ambient Noise Reduction) テクノロジーです。「聞き逃さない心音や肺音などの生体音は聴きやすく」を実現します。

### ■生体音聴診を容易に

従来のリットマンステスコープ 18 倍の音響増幅機能 (25dB) と ANR テクノロジーによる騒音低減機能が、周囲が騒がしく聴診が困難な環境下でも、生体音聴診を容易にします。

### ■この1器で新生児・小児・成人、痩せた患者様の聴診器用に

一般的な聴診器のようにダイアフラム全体を聴診部に密着させなくても一部だけの接触でも聴診が可能です。体の小さな患者様や頸部聴診、騒音などで静かな状況が保てない場合などにも適しています。



### ■モード選択



聴診部に合わせ、ベルモード (低周波音聴診モード) とダイアフラムモード (高周波聴診モード) が選択できます。

### ■操作はボタンで簡単に

「電源オン・オフ」「聴診器モード切替」「ボリューム調節」は、ボタン操作で行います。



各操作ボタンの名称は以下のとおりです。

操作ボタン	名称/操作した時に聞こえる音
	ベルモードボタン 電子音 (シングルトーン)
	ダイアフラムモードボタン 電子音 (ダブルトーン)
+	ボリュームアップボタン 電子音 (シングルトーン)
-	ボリュームダウンボタン 電子音 (シングルトーン)

※ローバッテリー インジケータートーン  
ボタン操作時に聞こえる音が上記表の通常の音と異なります。

### ■持ち運びしやすいコンパクトな設計

重量はわずか 155 g。電子聴診器でありながら一般的な聴診器と同じくらいに軽量です。また、チューブを折り曲げることができますので、ポケットなどに入れての持ち運びも簡単です。



### ■単4アルカリ電池1本で約200時間の使用が可能です。

### ■アダプターの取り付けが可能

電気・工業関係の分野の方には聴診部位にゴム製のアダプターがごさいます。異常音の検出には重宝します。製造業の生産過程においては、品質検査を行う際には、微弱な音の聴診が可能です。

商品番号	摘要	チューブの色	全長	重さ	ダイアフラム部直径
E-3000BK	電子聴診器	ブラック	73.7 cm	155 g	約 4.9 cm
E-3000NB		ネイビーブルー			



販売元  
有限会社 クリエイト  
〒828-0026 福岡県豊前市清水町 119  
Tel 0979-82-4812 Fax 0979-82-4803

ホームページアドレス

<http://www.choshinki.com> (聴診器ドットコム)

ご不明な点やご購入に際しましては、下記にご連絡下さい。

☎ 0120-332-746 (耳になじむ)

担当：中川 (日本商工会・商工会議所認定 一級販売士)

# お申し込み用紙

FAX番号:0979-82-4803 TEL 番号:0120-332-746(耳になじむ)

(メモされてお電話でお申し込みになる場合にもご利用下さい。)

■ご依頼主	
お名前	
ご住所	〒 -
電話番号	
プレゼント	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し (有りの場合、 <a href="#">ラッピング番号</a> をご記入下さい)
コメント	

お支払い方法	1. 代金引換 ・ 2. 銀行振込(ご入金確認後の発送となります)
発送のご連絡	1. 必要(連絡先: ) ・ 2. 不要

商品のご注文(刻印は下記の表を参考にされて下さい。)					
商品番号	器種名	色	数量	刻印場所	刻印名/字体
例:3000NB	電子聴診器 Model3000	ネイビーブルー	1	耳管	T.Yamada /スリム体 ヤマダタロウ

※商品の番号、器種名を必ずご記入下さい。刻印される場合はカタカナをフルネームでお願いします。  
アダプターがご入用であれば、上記の余白にご記入下さい。

刻印タイプ	刻印文字(例)	字体	文字数	価格(税込)	備考
耳管	H. AKITA ICHIRO たろう	活字体 ひらがな	15文字 以内	840円	・活字体は全て大文字となります。
耳管(スリム体)	Y. Watanabe	スリム体			小文字の「f, g, j, p, y, z」は刻印 できません。

ご希望事項: \_\_\_\_\_

0979-82-4803

表面時確認用  
3084-58-0760